

 	Allegato	All-SDF.LAB03.18
	ESAME COLTURALE TAMPONE NASALE	Pagina 1 di 1
		Aggiornato il: 05/07/2024

ESAME COLTURALE TAMPONE NASALE per ricerca patogeni o ricerca MRSA/MSSA

Istruzioni per il Paziente

Non eseguire lavaggi nasali o applicare terapia topica.

Non fumare nel periodo immediatamente precedente l'esecuzione del prelievo

Istruzioni per l'Operatore

MATERIALE NECESSARIO:

Tampone eSwab (tappo Rosa con terreno di trasporto) – si usano Tappo azzurro fino ad esaurimento scorte

PRELIEVO:

Inserire il tampone per 2-3 cm nelle narici facendolo ruotare sulla mucosa (Utilizzare un tampone diverso per ogni narice)

Inserire il tampone nell'apposito terreno di trasporto ed inviarlo in Laboratorio

CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEI CAMPIONI:

il campione deve essere inviato in Laboratorio appena possibile

durante il trasporto il campione deve rimanere a temperatura ambiente

se non inviato subito il campione deve essere conservato a 2-8 °C fino a 48 ore