

  LABORATORIO ANALISI	Allegato	All-SDF.LAB03.19
	TAMPONE OCULARE (CONGIUNTIVALE), ESAME COLTURALE	Pagina 1 di 1
		Aggiornato il: 05/07/2024

TAMPONE OCULARE (CONGIUNTIVALE), ESAME COLTURALE

Istruzioni per il Paziente

Non usare colliri o pomate oftalmiche nelle ore precedenti il prelievo.

Istruzioni per l'Operatore

MATERIALE NECESSARIO:

Tampone tappo ARANCIONE CON TERRENO di TRASPORTO.

PRELIEVO:

- Rimuovere dalla confezione il tampone sterile.
- Con il tampone prelevare le secrezioni oculari.
- Subito dopo il prelievo inserire il tampone nella provetta con il terreno di trasporto.
- Se richiesto, ripetere l'operazione nell'altro occhio con un nuovo tampone.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEI CAMPIONI:

Il campione deve essere inviato in Laboratorio appena possibile

Durante il trasporto il campione deve rimanere a temperatura ambiente

Se non inviato subito il campione deve essere conservato a 2-8 °C fino a 24 ore