

  LABORATORIO ANALISI	Allegato	All-SDF.LAB03.20
	TAMPONE MUCOSA ORALE, ESAME COLTURALE	Pagina 1 di 1
		Aggiornato il: 05/07/2024

TAMPONE MUCOSA ORALE, ESAME COLTURALE

Istruzioni per il Paziente

Rispettare il digiuno nelle ore precedenti la manovra.

Non eseguire gargarismi o sciacqui del cavo orale.

Non fumare nel periodo immediatamente precedente l'esecuzione del prelievo

Istruzioni per l'Operatore

MATERIALE NECESSARIO:

Tampone eSwab (tappo Rosa con terreno di trasporto) – si usano Tappo azzurro fino ad esaurimento scorte

PRELIEVO:

Premere la lingua con un abbassalingua.

Con un tampone con terreno di trasporto strofinare le mucose della lingua o del cavo orale e di eventuali lesioni.

Inserire il tampone nell'apposito terreno di trasporto ed inviarlo in Laboratorio

CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEI CAMPIONI:

Il campione deve essere inviato in Laboratorio appena possibile

Durante il trasporto il campione deve rimanere a temperatura ambiente

Se non inviato subito il campione deve essere conservato a 2-8 °C fino a 48 ore